

Always Confident Warranty® und Produktersatzprogramm

Gemäß FDA-Empfehlungen bietet Establishment Labs eine eingeschränkte Garantie für sein Motiva Implants®-Produktsortiment an, die die Lieferung eines Austauschprodukts im Fall einer Ruptur während der Lebensdauer des Implantats beinhaltet. Establishment Labs bietet Unterstützung bei Kapselkontraktur der Baker-Grade III und IV über sein Produktaustauschprogramm. Außerdem sind zwei verschiedene erweiterte Garantieprogramme für unsere Produkte bei Ruptur oder Kapselkontraktur der Baker-Grade III oder IV verfügbar, die finanzielle Unterstützung für die Revisionsoperation bei einem Implantatsaustausch bieten:

5y Motiva Program™ Extended Warranty Program

Für Motiva Implants® mit Q Inside Safety Technology™ bietet das 5Y Motiva Program™ eine finanzielle Unterstützung von bis zu 2.500,00 € je betroffenen Implantats.

2y Motiva Program™ Extended Warranty Program

Für Motiva Implants® ohne Q Inside Safety Technology™ bietet das 2Y Motiva Program™ eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1.000,00 € je betroffenen Implantats.

Informationen zum Erwerb bzw. die allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Geltungsbereich der erweiterten Garantieprogramme sowie die Bedingungen unserer Always Confident Warranty® finden Sie unter www.motivaimplants.com. Fragen Sie bei besonderen Umständen nach unserem Always Confident Support Program®.

Der Beginn eines neuen Weges

Die Möglichkeit, neue Wege zu gehen, dabei Veränderungen zu erfahren und etwas nur für sich zu tun, ist aufregend: über eine Million Frauen entscheiden sich jährlich für eine Brustvergrößerung¹. Dabei sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Einige Entscheidungen müssen Sie allein treffen, andere hingegen gemeinsam mit Ihrem Chirurgen.

Diese Broschüre hilft Ihnen, sich mit einigen der Themen vertraut zu machen, die Sie mit Ihrem Chirurgen besprechen werden. Darüber hinaus informiert sie im Detail über die Brustimplantate Motiva Implants® von Establishment Labs, einem der international führenden Brustimplantate-Hersteller. Diese Informationen unterstützen Sie auf Ihrem weiteren Weg zur Brustvergrößerung.

Warum Motiva®-Implantate?

„Innovation für mehr Sicherheit“ bringt die Zielsetzungen von Establishment Labs, dem Hersteller der Motiva Implants®, auf den Punkt: Jahrelange Forschung und Entwicklung bei Brustimplantaten haben zu einer Produktlinie geführt, die alle Anforderungen anspruchsvoller Patientinnen und Chirurgen erfüllen:

- Umfassende Erfahrung in der Brustästhetik
- Innovative, patentierte Technologien, die die Patientensicherheit gewährleisten
- Strenge Fertigungspraktiken, die europäischen und US-Normen entsprechen
- Dokumentierte Sicherheit und Leistung im Rahmen einer kontrollierten klinischen Studie 5 Jahre nach der Implantation bzw. basierend auf Patienten-Erfahrungen: Keine Späterome oder Doppelkapseln, weniger als 1 % Kapselkontrakturen und sehr hohe Patientenzufriedenheit (94 %)²,³

Bei der Auswahl eines Brustimplantats sind viele Punkte mit einzubeziehen, denn jede Frau ist anders – in Bezug auf Körpertyp, Lebensstil und auch das gewünschte Aussehen. Dementsprechend berät Sie Ihr Chirurg bei der Wahl des passenden Motiva-Implantats. Er wählt gemäß Ihrer Anforderungen z. B. Art des Materials und der Oberfläche und auch die passende Form, Größe und Projektion.



Ihre Fragen an den Arzt:

Establishment Labs:

Coyol Free Zone,
Alajuela, Costa Rica
www.motivaimplants.com

Vertrieb Deutschland:

MenkeMED GmbH
Tucherpark 22
85622 Feldkirchen
089 2020446-0
info@menke-med.de
www.menke-med.de

www.motivaimplants.com
www.menke-med.de

1. International Society of Aesthetic Plastic Surgery (2015). ISAPS Global Statistics; 2010-2015. Verfügbar unter: <http://www.isaps.org/news/isaps-global-statistics>.
2. Motiva Implants(R). (2016). Motiva Implants(R) Silicone Breast Implants Summary Of Clinical Data: 5 Year Follow-up. Alajuela: Establishment Labs S.A.
3. Motiva Implants® Post-market Surveillance Report, Juni 2016



Wählen Sie mit Zuversicht
Für Patienten, die eine Operation zur
Brustvergrößerung erwägen



www.motivaimplants.com
www.menke-med.de

Silikongel-Optionen

für die von Ihnen gewünschte Größe und Form

Das zum Füllen der Implantate verwendete Gel beeinflusst, wie das Implantat nach dem Einsetzen aussieht und wie es sich anfühlt. Motiva Implants® sind mit zwei verschiedenen Silikongelen erhältlich, deren Eigenschaften Sie und Ihr Chirurg bei der Planung des persönlichen Ergebnisses miteinbeziehen sollten.

ProgressiveGel™ PLUS
Ein natürlicheres Aussehen als klassische runde Implantate



ProgressiveGel™ Ultima™
Optik und Gefühl einer natürlichen Brust



Ausgewogene Gelelastizität und -festigkeit

Elastisches, weiches Gel

Fülle im unteren Brustpol

Passt sich der Brustform an

Jüngerer, aktiverer Aussehen

Harmonisches Aussehen und Gefühl

Mittleres Profil



Natürliches Profil



Diese verschiedenen Gelarten, kombiniert mit einer Vielzahl weiterer Eigenschaften, bieten Ihrem Chirurgen eine große Auswahl an Implantaten, um genau das von Ihnen gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Ergonomix™

Die Premium-Option in puncto Erscheinungsbild und Bewegung einer natürlichen Brust sind Ergonomix-Implantate: Diese Implantate, auf patentierten Technologien basierend entwickelt, folgen den Bewegungen der Frau - sie behalten beim Liegen eine runde Form und nehmen beim Stehen eine natürliche Tropfenform an. Ganz gleich, wofür Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Implantate gemäß den höchsten Standards produziert und durch eine lebenslange Garantie unterstützt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Rückseite.




Gespräch mit Ihrem Chirurgen

Über Ihren Eingriff

Die Auswahl des Implantats ist eine wichtige Entscheidung vor der Brustvergrößerung, aber nicht die einzige. Der Chirurg kann auch verschiedene Operationstechniken anwenden, um das von Ihnen gewünschte Ergebnis zu erreichen. Er wird mit Ihnen möglicherweise auch Folgendes besprechen:

Ort des Schnitts


1. Inframammär (in der Unterbrustfalte)
2. Periareolär (rund um die Brustwarze)
3. Transaxillär (in der Achselhöhle)

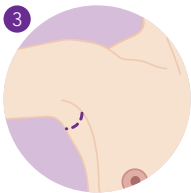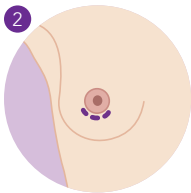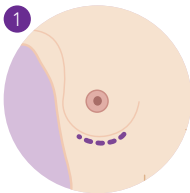


Platzierung des Implantats

1. Subpectoral (unter dem Brustmuskel)
2. Subglandulär (unter dem Brustgewebe)
3. Dual Plane (halb unter dem Muskel, halb unter dem Brustgewebe)


Diese Optionen haben jeweils ihre eigenen Vorteile und damit verbundenen Überlegungen; sie lernen Sie im Gespräch mit Ihrem Arzt genauer kennen und können dann entscheiden, was das Richtige für Sie ist.

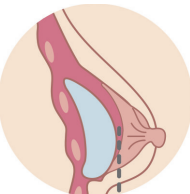

Pektoralismuskel

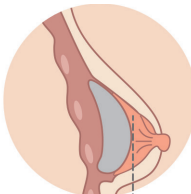

Brustdrüse

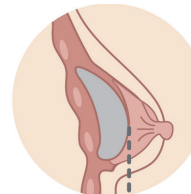

Pektoralismuskel

Grundlegendes über Ihre Operation

Die Brustvergrößerung ist ein gängiger Eingriff mit einer hohen Zufriedenheitsrate. Jedoch sollten Sie wie bei allen Operationen immer die potenziellen Risiken mit Ihrem Chirurgen besprechen.

Je nach der Art des Eingriffs dauert die Operation normalerweise ein bis zwei Stunden.

Die Brustvergrößerung wird standardmäßig in Vollnarkose durchgeführt und ist ein stationärer Eingriff, Sie bleiben also für eine Nacht im Krankenhaus. In einigen Fällen können Sie am Tag der OP bereits wieder nach Hause gehen.

Der postoperative Erholungsprozess hängt von Ihrer persönlichen Gesundheit und weiteren Faktoren ab. In den ersten 48 Stunden können erhöhte Körpertemperatur und Schwellungen auftreten, die jedoch mit der Zeit abklingen.


Allgemeine Empfehlungen

- Wenn Sie nach der Operation schlafen oder sich hinlegen, sollten Sie den Kopf leicht erhöht positionieren und seitliches Liegen vermeiden. Halten Sie Ihre Arme eng am Körper und vermeiden Sie das Heben von Lasten, bis Ihr Chirurg es erlaubt.
- Fahren Sie für mindestens zwei Tage nach der Operation nicht Auto und treiben Sie erst Sport, wenn Ihr Chirurg dies erlaubt.
- Setzen Sie Ihre Brüste erst direktem Sonnenlicht aus, wenn Ihr Chirurg dies erlaubt.
- Möglicherweise empfiehlt Ihr Chirurg Ihnen eine Heilcreme.



Registrieren Sie Ihre Motiva Implantate und profitieren Sie von der erweiterten Garantie

Verwenden Sie Ihre Motiva Implants® ID-Karte (My Motiva Implants® ID), um Ihre Implantate mit einer gültigen Seriennummer innerhalb von 90 Tagen nach der Operation zu registrieren. Sie können sich über die Motivalmagine™-App oder auf www.register.motivaimplants.com/patient/register registrieren.

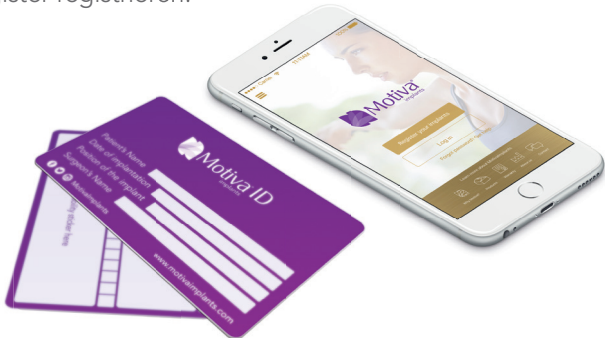

Q Inside Safety Technology™

Motiva-Implantate bieten auch eine einmalige Sicherheitstechnologie: in einige Implantate ist ein Mini-Chip (von der FDA zugelassener Mikrotransponder) integriert. Er ermöglicht Ihrem Arzt mit Hilfe eines Handlesegeräts, wichtige das Implantat betreffende Informationen (z.B. Seriennummer) von außerhalb des Körpers abzurufen, auch wenn Sie Ihre Motiva Implants® ID-Karte nicht dabei haben. So kann Ihr Arzt bei Bedarf schnell und sicher auf Ihre Registrierungsinformationen zugreifen. Das Auslesen der Daten ist aus maximal 30cm Distanz möglich.

Im Fokus:

Brustgesundheit

Establishment Labs S.A. ermutigt jede Frau, jährliche Brustuntersuchungen sorgfältig durchführen zu lassen. Im Allgemeinen sind die bei Mammografien verwendeten Technologien mit Brustimplantaten kompatibel. Trotzdem ist es wichtig, dass sie das medizinische Personal darüber informieren, dass Sie Brustimplantate tragen.

- Falls Magnetresonanztomographie (MRT) als Teil der Untersuchung eingesetzt wird, sollten Sie den Röntgentechniker darüber informieren, dass Sie Motiva-Implantate mit Q Inside Safety Technology (einem MRT-fähigen ID-Chip) tragen.