


Motiva Flora® Port Locator


Kurzanleitung




Reinigen und desinfizieren Sie es mit einem fusselfreien Baumwolltuch und Isopropylalkohol. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder Lösungsmittel.

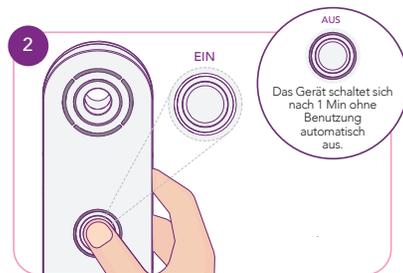


Schalten Sie das Port Locator ein, indem Sie die Taste drücken und sie loslassen, sobald der weiße Licht-Ring EINGESCHALTET ist.

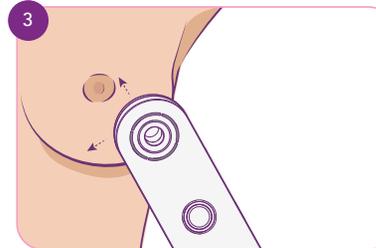


Positionieren Sie den oberen Teil des Geräts in die Nähe der Brust und bewegen Sie ihn auf der Suche nach der Einspritzöffnung.

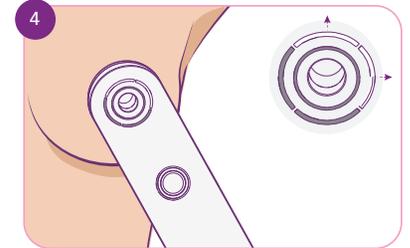


Weißer Lichter leuchten auf und zeigen die Position der Öffnung an.

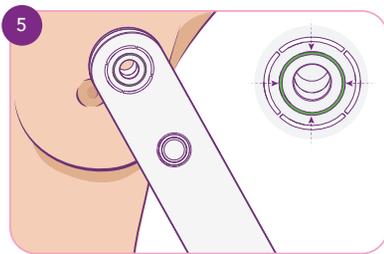


Sobald die Einspritzöffnung gefunden wurde, leuchtet ein grüner Leuchtring auf.

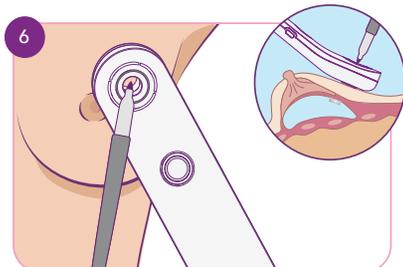

Halten Sie das Gerät ruhig und markieren Sie die Einspritzöffnung anhand des Öffners des Geräts mit einem chirurgischen Markierer, senkrecht zur Brusthaut und/oder drücken Sie fest auf das Gerät, um eine temporäre Vertiefung auf der Haut zu erzeugen, wo sich die Öffnung befindet.

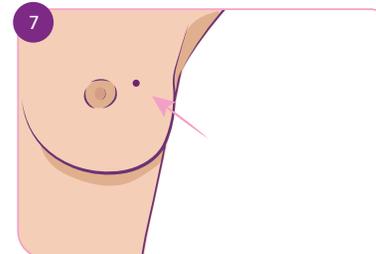


Entfernen Sie das Port Locator und verwenden Sie den markierten Punkt oder die Mitte der Vertiefung auf der Haut als Nachweis für die Injektionsstelle.

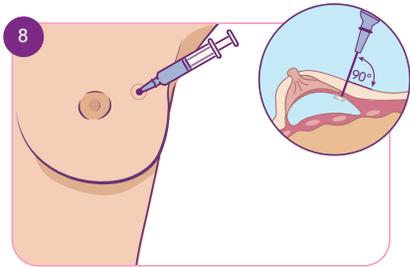

Führen Sie die Nadel im 90-Grad-Winkel zur Brust ein und beginnen Sie mit der Füllung des Gewebeexpanders.

BENUTZERSCHNITTSTELLE FARBEN-CODE

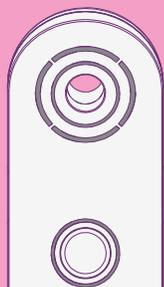

GERÄT EIN & ANSCHLUSSSTELLE		
EIN	ANSCHLUSSSTELLE	ANSCHLUSS GEFUNDEN
FESTES WEISS	FESTES WEISS	FESTES GRÜN
FESTES WEISS	FESTES WEISS	FESTES WEISS

BATTERIE-STATUS		
SCHWACHE BATTERIE	WIRD GELADEN	GELADEN
BLINKENDES ORANGE	BLINKENDES BLAU	FESTES BLAU

RISIKO
WARNUNG
FESTES ROT