

Desinfektion ohne Alkohol -  
auf Basis von Wasser und Salz



## Ökopur med Eigenschaften:

Hergestellt auf Basis von Wasser und Salz.  
Enthält keinen Alkohol oder andere Zusätze  
wie Farb-, Konservierungs- oder Duftstoffe.  
Lösungsmittelfrei.

## Anwendungsgebiete:

Zur Desinfektion von Flächen aller Art  
im gewerblichen oder privaten Bereich.

Beispiele:

Behandlungsräume  
Wartezimmer  
Arbeitsflächen  
Sanitärbereiche  
Trinkwasser u.v.m.

Kann auch zur Geruchsreduktion  
verwendet werden.

## Anwendung:

Flächen vollständig benetzen und trocknen  
lassen. Nicht nachwischen.

## Informationen:

- Als Flächendesinfektionsmittel beim VAH zertifiziert.
- Gelistet beim IHO\* (Lebensmittel) und der ÖGHMP\*\*\*
- Getestet nach DIN EN Normen, sowie den Leitlinien  
des DVV/RKI und VAH.
- HALAL-konform
- Getestet durch das IQUH\*\*
- Registriert bei der BAuA mit der Nummer N-67368  
Produktart 2 / 3 / 4 / 5

## Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid  
(behüllte Viren)
- wirksam gegen Norovirus

## Einwirkzeit:

(unverdünnt)  
bakterizid 15 Minuten  
levurozid 5 Minuten

(gem. EN13697)

Begrenzt viruzid 5 Minuten  
(behüllte Viren - BVDV/Vaccinia)

Norovirus 5 Minuten  
(gem. DVV/RKI)

## Inhaltsstoffe:

Wasser, Salz,  
Hypochlorige Säure

## Wirkstoffkonzentration:

Aktives Chlor freigesetzt aus  
Hypochloriger Säure 0,42g/l

ph-Wert: 6,5 - 6,9

## Verfügbare Gebinde:

Flaschen 250ml 1000ml  
Kanister 5l 20l IBC 1000l

\* Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

\*\* Institut für Qualitätsmanagement und  
Umfeldhygiene

\*\*\* Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikro-  
biologie und Präventivmedizin

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  
Produktinformation lesen.**

## Vorsichtsmaßnahmen:

Keine Schutzausrüstung notwendig.  
Bei nicht farbechten Textilien bitte nur leichten Sprühnebel auftragen!  
Materialverträglichkeit prüfen.

## Unverträglichkeiten:

Es sind keine Unverträglichkeiten bekannt.

## Lagerung:

**Ökopur med** Produkte bei Zimmertemperatur und dunkel lagern.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Entsorgung:

Leere Behälter dem Recycling zuführen.

## Haltbarkeit:

Das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf dem Behälter.

## Weitere Produkte:

**Ökopur animal, Ökopur flora, Ökopur horse, Ökopur home,  
Ökopur skin, Ökopur skin GEL**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



**MenkeMED**  
Medizintechnik

**MenkeMED GmbH**  
Tucherpark 22  
85622 Feldkirchen  
E-Mail: [info@menke-med.de](mailto:info@menke-med.de)  
Tel.: 089 2020 46-0